

Link do produktu: <https://swiatkosmetyczki.pl/torebki-do-sterylizacji-90x135mm-op-200-szt-p-5309.html>

Torebki do sterylizacji 90x135mm - op. 200 szt.



Cena	29,99 zł
Numer katalogowy	2333-TDS90x135
Kod EAN	5904169464466

Opis produktu

Samoprzylepne torebki foliowo - papierowe wykonane zostały z papieru medycznego o gramaturze 60g/m² i wielowarstwowej folii PET/CPP. Torebki stosowane są do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM). Szeroka gama rozmiar zapewnia możliwość wyboru produktu do konkretnych wymagań i przeznaczenia, a samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu.

Papier:

- Gramatura: 60g/m²
- Papier medyczny zgodny z normą EN PN 868-3
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna zarówno na sucho jak i na mokro

Folia:

- Przezierny laminat foliowy PET/CPP wielowarstwowy (6 warstw + warstwa kleju)
- Umożliwia łatwą identyfikację zawartości pakietu
- Kolor: niebieski
- Grubość: 52 µm

Zgrzew i nadruk:

- Zgrzew wielokanałowy o łącznej szerokości 11.5 mm zgodny z normą EN PN 868-5
- Nadruk oznaczeń poza obszarem pakowania eliminuje możliwość kontaktu farby z zawartością pakietu

Wskaźniki sterylizacji:

- Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1
- Powierzchnia wskaźnika >100 mm²
- Wyraźna zmiana barwy wskaźnika informująca o poddaniu pakietu procesowi sterylizacji

Taśma samoprzylepna:

- Taśma samoprzylepna umożliwiająca przygotowanie pakietu bez konieczności użycia urządzeń zgrzewających

Sposób użycia torebek do sterylizacji:

- Narzędzia i przedmioty należy ostrożnie umieścić w torebkach usuwając z nich nadmiar powietrza przed zamknięciem.

-
- Torebki powinno się stawiać pionowo, co ułatwia proces sterylizacji i suszenia.
 - Dwie torebki powinno się układać stroną foliową do foliowej i papierową do papierowej.
 - Na torebkach nadrukowano kolorowy wskaźnik chemiczny informujący wyłącznie o przeprowadzeniu sterylizacji.
 - Potwierdzenie sterylizacji powinno się wskazać dodatkowym wskaźnikiem chemicznym, bądź biologicznym (dostępne w naszej ofercie)
 - Po wysterylizowaniu nie należy dopuszczać do zawilgocenia, uszkodzenia lub przypadkowego otwarcia torebek.

Okres przydatności do użycia wynosi dwa lata od daty produkcji.